

DAILIES® apreciază frumusețea și recomandă naturațea



DAILIES® – marca no.1 de lentile de contact pentru o zi în Europa, sunt aliatul tău discret pentru o frumusețe naturală.

Agentul de hidratare încorporat - activat prin clipit, oferă confort la aplicare și pe parcursul întregii zile.

Lentilele de contact DAILIES® sunt soluția potrivită atunci când vrei să arăți cât mai natural, iar prin machiaj să pui în valoare anumite trăsături ale feței. DAILIES® sunt 'micul tău secret'.

Pentru a te bucura din plin de ele și de tine, iată câteva recomandări:

- Spală-te bine pe mâini înainte de a atinge lentilele de contact și evită săpunurile parfumate sau cu indicație medicală; sterge-te cu un prosop care nu lasă scame.
- Aplică lentilele Dailies ÎNAINTE de a începe să te machiezi (te va ajuta să vezi mai bine când îți aranjezi machiajul 😊). Le vei scoate tot ÎNAINTE de demachiere.
- Închide ochii dacă folosești pudră fină, pentru a-ți proteja ochii.
- Evită rimelul cu efect de alungire a genelor, deoarece conține fibre ce se pot desprinde iritându-ți ochii.
- Specialiștii în eyecare recomandă să folosești cosmetice cremă sau lichide. Particulele fine din compoziția celorlalte pot genera disconfort prin contactul cu ochii. Evită fardurile cu sclipici.
- Nu folosi niciodată creion de contur sau eyeliner pe interiorul pleoapei.
- Fixativul pentru păr sau alte produse cu aerosoli, folosește-le înainte de a aplica lentilele DAILIES®.
- Păstrează produsele cosmetice cu capacele bine închise și înlocuiește-le la cel puțin 3 luni pentru a evita acumularea de bacterii.

Aceste recomandări te pot ajuta să îți pui în evidență ochii, privirea fără griji.

Bucură-te din plin și în timpul liber cu DAILIES®!