

Focus®
DAILIES®
 ONE-DAY CONTACT LENSES *All Day Comfort*



Caracteristici tehnice

Focus Dailies Sferic

Material	Nelfilcon A, cu tenta de vizibilitate albastră
Conținut de apă	69%
Diametru și rază de curbură	13,8 mm și 8,6 mm
Dioptrii	de la +0,50 la +6,00 dpt, pas de 0,25 de la -0,50 la -6,00 dpt, pas de 0,25 de la -6,50 la -10,00 dpt, pas de 0,50
Modalitate de purtare	zilnică
Mod de înlocuire	unică folosință, 1/zi
Ambalare	cutie cu 30 lentile
Cost mediu/zi	6,6 lei (preț recomandat)

Focus Dailies Toric

Material	Nelfilcon A, cu tentă de vizibilitate albastră		
Conținut de apă	69%		
Diametru și rază de curbură	14,2 mm și 8,6 mm		
DIOPTRII	SFERA:	CYL	AX
de la +4,00 la -6,00 dpt, pas de 0,25		- 0,75 cyl; - 1,50 cyl	90°; 180°
de la -6,50 la -8,00 dpt, pas de 0,50			
Design	două zone subțiate superior și inferior, pentru confort		
	suprafață posterioară torică		
Modalitate de purtare	zilnică		
Mod de înlocuire	unică folosință, 1/zi		
Ambalare	cutie cu 30 lentile		

Focus Dailies Progressive

Material	Nelfilcon A, cu tentă de vizibilitate albastră
Conținut de apă	69%
Diametru și rază de curbură	13,8 mm și 8,6 mm
Dioptrii	de la +5,00 la -6,00 dpt, în pas de 0,25
Adiție unică	3 dpt
Modalitate de purtare	zilnică
Mod de înlocuire	unică folosință, 1/zi
Ambalare	cutie cu 30 lentile

Ghid de adaptare

1. Efectuați refracția.
2. Aplicați lentila de probă.
3. Lăsați lentila 5 minute să se stabilizeze pe ochi.
4. Controlați acuitatea vizuală, după caz, efectuați refracția peste lentilă, folosind rama de probă.
5. Evaluați adaptarea. Optimă: centrare bună, mobilitate de 0,25 mm.



Avantajele lentilelor Focus Dailies

Confort	Profil exclusiv cu 3 raze de curbura, pe ambele fețe ale lentilei, margini fine. Mai mult confort, acum cu un conținut de 5 ori mai ridicat de PVA – agent de umidificare ce acționează până la 16 ore de port al lentilei.
Siguranță	O lentilă nouă în fiecare zi înseamnă depuneri reduse pe lentilă, eliminarea întreținerii și a riscului de alergii.
Libertate	Ușurință în aplicarea lentilelor și a manipulării lor. Fără soluții de întreținere. Port alternativ cu ochelarii, ocazional. Focus Dailies seduce pe oricine, în special noii purtători!
Adaptare ușoară	Focus Dailies se stabilizează pe ochi în mai puțin de 5 minute.



Sunați acum la OPTIMED și comandați lentile de probă, la telefon 0268/471603 sau 0268/473234.

Pentru alte informații referitoare la prescripțiile de lentile AIR OPTIX:

Vizitați site-ul www.airoptix.com sau contactați-ne la adresa de e-mail office@optimed.ro

CIBA VISION.
Shared Passion for Healthy Vision and Better Life

 **optimed**